

Préparation d'un liquide de Ponction en vue d'un examen microbiologique

Nous avons besoin d'au minimum :
1 tube sec + 1 tube citraté +++.

*Si possibleensemencer 2 flacons d'hémoculture
(au minimum 1mL dans chaque flacon)
afin de ne pas perdre les germes fragiles*

***Pensez à bien retenir le piston pour ne pas laisser partir la
totalité du liquide dans le flacon+++.***

Ne pas transmettre
la seringue avec l'aiguille
(sécurité pour le patient)



**Et surtout, joindre des renseignements cliniques,
indispensables pour un résultat de bactériologie
de qualité+++++**